

SUGGESTED CURING TIMES

DENTAL	STANDARD	HIGH POWER	XTRA POWER
POWER (mW/cm²)	1000*	1400* •	3200¹ 🌞
POWER BUTTON TIMING INTERVAL LIGHTS — MODE/STATUS LIGHT TIME/MODE CHANGE — BUTTON	♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦	(a) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	△ 3 sec.
PER 2mm LAYER	1 X 10 SECONDS	2 X 4 SECONDS	1 X 3 SECONDS
FINAL CURE	2 X 10 SECONDS	3 X 4 SECONDS	2 X 3 SECONDS

ORTHO

1 X 10 SECONDS 2 X 4 SECONDS 2 X 3 SECONDS **METAL & CERAMIC BRACKETS**

Applicable for all current and future Ultradent and Opal Orthodontics light-cured materials.

Isopropyl alcohol will not damage the curing light and is the best option to use when cleaning and wiping down your VALO.

*As measured by a properly calibrated Demetron® radiometer †As measured by an integrating sphere and the MARC unit



800.552.5512 ULTRADENT.COM

99453.6 062414 © 2014 Ultradent Products Inc. All rights reserved.

